

# CLEARFIL™ AP-X Esthetics



## ПРОСТО И ЕСТЕСТВЕННО

ДО



ПОСЛЕ (А3/ОА3)



CLEARFIL™ AP-X Esthetics едва ли отличим от натурального зуба по свойству рассеивания световых лучей и прозрачности. Просто выберите и используйте один оттенок, совмещающий свойства дентина и эмали.

ДО



ДО (препарирование)




Фотографии предоставлены Dr. Montri Chantaramungkorn, DDS, FRCDT, TBOD Chiang Mai University, Thailand.

## РАСSEИВАНИЕ СВЕТА, КАК У НАТУРАЛЬНОГО ЗУБА

Реставрации с использованием CLEARFIL™ AP-X Esthetics незаметны и неотличимы от натурального зуба. Это качество достигается за счет отличного рассеивания световых лучей, чем не обладает большинство обычных композитов.



Рассеивание большинства композитных материалов

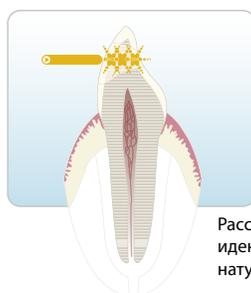

Рассеивание CLEARFIL™ AP-X Esthetics идентично рассеиванию света тканями натурального зуба


Натуральный зуб поглощает лучи света и рассеивает их во всех направлениях. Благодаря уникальному составу CLEARFIL™ AP-X Esthetics обладает этим же свойством, максимально приближенным по своим показателям к натуральному зубу, в то время как другие композитные материалы пропускают световые лучи, но не рассеивают их, что приводит к эффекту затемнения отреставрированного участка и неэстетичного общему внешнему виду зуба.


## Свойства рассеивания световых лучей

	Материал А	CLEARFIL™ AP-X	CLEARFIL™ AP-X Esthetics	Зуб быка
Изображение на просвет с контрастной поверхностью				
До засвечивания				
Позитивное изображение во время засвечивания				
Негативное изображение во время засвечивания				

Диск из композита снизу был засвечен полимеризационной лампой с расстояния 4,5 мм через стекло. В итоге материал не изменил однородности цвета и структуры.

Толщина диска: 0,25 мм  
Толщина стекла: 2,0 мм  
Полимеризационная лампа: L.E.Demetron I

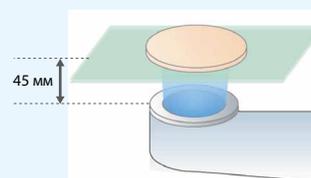

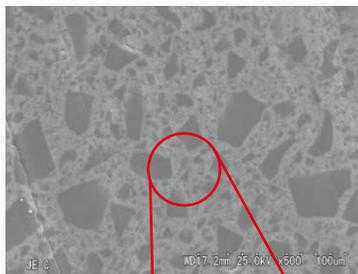


### Светорассеивающий наполнитель

Органический наполнитель нового поколения содержит нанополлеры высокой прозрачности, которые обеспечивают рассеивание света, идентичное тканям натурального зуба.

### Преломление на матрицу

### Рентгеноконтрастный наполнитель

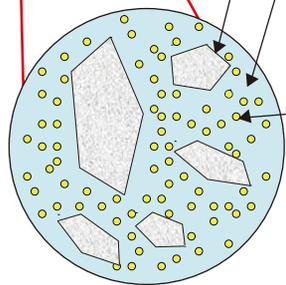


## РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ И ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ

- Благодаря высокой рентгеноконтрастности, композит легко просматривается на рентгеновских снимках.
- CLEARFIL™ AP-X Esthetics флюоресцентный материал.

### Рентгеноконтрастность



### Флюоресценция

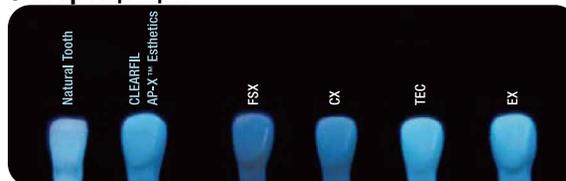

## СТАБИЛЬНЫЙ ЦВЕТ И ПРОЗРАЧНОСТЬ


CLEARFIL™ AP-X Esthetics после световой полимеризации меняет только цвет, в то время как другие композиты меняют не только цвет, но и теряют прозрачность. Данное качество материала значительно упрощает работы по реставрации.

### CLEARFIL™ AP-X Esthetics

### CLEARFIL™ AP-X

### Материал В

### Материал С

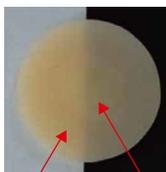

После световой полимеризации

До световой полимеризации




2720-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics Kit (A2, A3, A3.5, B2)	2729-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics C3
2722-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics A1	2730-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics T
2723-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics A2	2732-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics XL
2724-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics A3	2733-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics OC
2725-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics A3.5	2735-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics OA3
2727-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics B2	2737-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics HO
2728-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics B3	2721-WD	CLEARFIL™ AP-X Esthetics Расцветка

1 шприц 3,6 г (2,0 мл)

### ЦВЕТА МАТЕРИАЛА

Расцветка CLEARFIL™ AP-X Esthetics изготовлена из композитного материала CLEARFIL™ AP-X Esthetics, что упрощает подбор цвета реставрации.

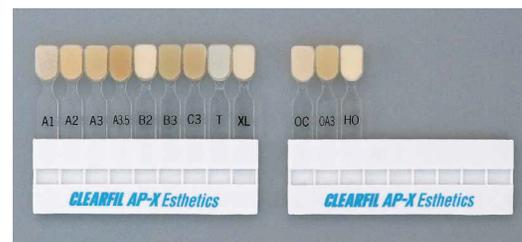

- Ознакомьтесь с инструкцией до начала использования материала.
- Данные о сравнениях материалов основаны на результатах исследований, проведенных Kuraray Noritake Dental Inc
- Цвета материалов, приведенных в данной брошюре, могут отличаться от фактических цветов.
- Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены без предварительного уведомления.



г. Москва, ул. Профсоюзная 57, офис 522  
+7 495 120 22 74  
zakaz@expodent.biz  
expo-dent.com

Kuraray Noritake Dental Inc.